


福祉用具貸与・販売事業所 (株)新和メディカル 諫早営業所

しんわ通信 10月号

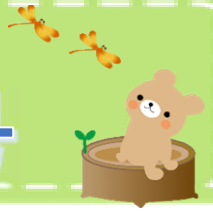

暑さが少し和らぎ、朝晩は涼しく過ごしやすい季節となりました。
ですが季節の変わり目は風邪を引きやすい季節でもありますので、体調管理には気をつけないといけませんね😊

今月号では、先月号で掲載いたしました、停電によって想定される事態の中のひとつ、エアマットが使用できなくなった場合の対応方法について紹介します。

先月号に引き続き・・・

災害などで停電時の対処について part.2

～高機能エアマットレスご利用中の場合～




【停電時にエアマットレスが受ける影響】

一般的にエアマットレスはその構造上、停電などで電力供給が止まった状態では、時間の経過とともにマット内の空気が少しずつ抜け、耐圧分散性が徐々に低下します。その結果、何もしなければ数時間～1日程度で底着き(体がベッドの床板に当たる状態)し、利用者様にとって苦痛で危険な状態となる恐れがあります。

主にレンタルして頂いているエアマットレス

- ・スモールチェンジ ラグーナ
- ・ビッグセル インフィニティ
- ・オスカー(ハイブリッドタイプ)

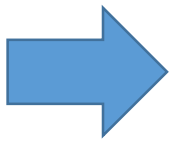

結論から申し上げますと、主にレンタルして頂いている上記の商品は、**停電の際は、特別な操作を行う必要はありません。**
電気供給が無くなった場合を想定した機能が備わっています。

※また、電気復旧後は、上記のどの商品にも自動的に停電前の状態に復帰する機能が備わっているため、**再設定は不要**です。



★スモールチェンジ ラグーナ

★エアーマスタービッグセル インフィニティ

→停電対策機能付きです。

・停電と同時に特殊なバルブが自動的にエア抜きを防止し、マットレス全体の内圧を約14日間保持します。

★オスカー(ハイブリッドタイプ)

→空気が抜けにくい構造になっています。

仮にエア層の空気が抜けても、ウレタン層が底着きを防止するため、停電時間の長さに関わらず特別な対策は不要です。

おすすめ新商品 多点杖の新しいカタチ。一本杖と変わらない超軽量!

楽スマ スリーベース

楽スマ スリーベース
介護保険レンタル商品



TAISコード:00875-000013 製品安全協会合格品
「SGマーク」取得



握りやすいグリップ



押しやすいボタン



わずか
320g!

超軽量タイプ



大きな杖先ゴム

2点で着地し、1点で蹴り出す





長さ:67~88cm
(適応身長:128~170cm)
重さ:320g 耐荷重:100kg
本体:アルミ合金
グリップ:カルプPP樹脂+抗菌グリップ付

月額レンタル料
100円 / 1割負担

レンタル料金は地域により異なる場合があります。

頭の体操◆漢字クイズ⑤

- ①四角の中に入る漢字はなんでしょう?
- ②答えの漢字、二文字を合わせると、答えは...

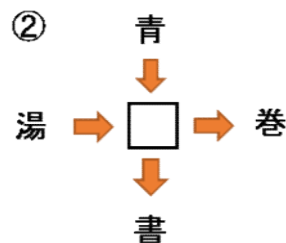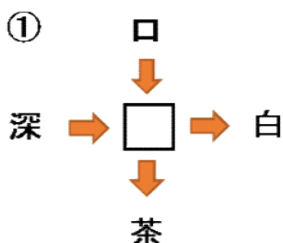

《何かが不明な点等ございましたら、下記にご連絡ください。》

(株)新和メディカル 諫早営業所 担当:
〒854-0053 諫早市小川町792-3
TEL:0957-47-6618 FAX:0957-47-6628
携帯:

