

# しんわ通信 R4年9月号

## ご存じですか？『排泄予測支援機器』

皆さんは『排泄予測支援機器』をご存じでしょうか。

2022年4月から、介護保険が給付される「特定福祉用具販売」の対象種目に「排泄予測支援機器」が追加されました。

(※ただし、保険適用の製品となるのは、厚生労働省がメーカーからの提案を受理した後でその有効性や安全性などを審査し、それにクリアしたものに限られます)

排泄予測支援機器とは、利用者の膀胱内での尿の蓄積量を可視化し、周囲の介護者などに排尿のタイミングを知らせる機能を持つ機器のことです。

### ＜排泄予測支援機器の主な利用効果＞

- ・自分でトイレに行けるが身体機能の低下でトイレに着くまでに時間がかかり不安な方などは、尿のたまり具合が確認できるので、事前に余裕をもってトイレに移動ができるので、失敗を減らすことが可能になる。
- ・歩行が困難で介助者の移乗などの介助が無いとトイレに行けない方は、介助者が尿のたまり具合を確認でき、適切なタイミングでの声掛けやトイレへの誘導を行えるので、漏れを減らすことが可能になる。

新設された種目であり、取り扱いも特殊な為、厚労省通知の『介護保険最新情報 Vol.1059』に取り扱いの留意事項が記載されていますので、こちらも合わせてご確認ください。

裏面記載の『排泄予測支援機器・DFree』は当社で取り扱いが可能です。詳しい情報が知りたい方は、エリア担当者までご連絡を下さい！



# 排尿のタイミングを お知らせ

在宅介護向け  
新製品

特定福祉用具  
- 排泄予測デバイス -

## D Free

HomeCare

## DFreeの仕組み

### 超音波による安全な膀胱観察

エコー診断にも利用されている、人体に安全な超音波を利用した DFree は、膀胱内の尿のたまり具合を捉えます。計測した膀胱のデータをリアルタイムで解析し、DFree 専用アプリやパソコン上で表示します。



DFree には超音波センサーが4個搭載されており、反応するセンサーの数に応じて、尿のたまり具合を10段階で表示しています。

### 超音波診断装置で捉えた「膀胱のエコー画像」



## DFree装着用シート

専用の DFree 装着用シートは、センサーのずれを抑え、簡単に DFree を装着することができます。DFree 本体を DFree 装着用シート中央部にはめてご利用いただけます。プレミアムとスタンダードの2種類あり、3～5回を目安に繰り返しご利用可能です。



## 機器構成

DFree と専用お知らせ機器が Bluetooth で接続するため、Wi-Fi などネットワーク環境は必要ありません。専用お知らせ機器は DFree 機能に制限されます。



## 製品仕様と販売価格

DFree 本体と専用お知らせ機器をセットにして販売。装着シートと超音波ジェルをサンプルとして同梱します。

介護保険適用  
小売希望価格  
**99,000円(税込)**

同梱サンプル

- 装着用シート
- 超音波ジェル

DFree製品仕様		専用お知らせ機器	
大きさ	本体部:W51×D36×H17(mm)	電源	内蔵リチウムイオン電池
重さ	26g	動作時間	約40時間(満充電には約4時間必要)
防水性	水洗い可能	通信方式	Bluetooth® LE 5.0
		主な付属品	ACアダプター

※専用お知らせ機器は、DFreeの利用用途以外にはご利用いただけません。  
※製品仕様・外観およびカラーは予告なく変更することがあります。この情報は2022年3月現在のものです。

個人での  
利用効果

効果実感  
全体の**78.4%**  
が効果あり

失禁回数  
**46.8%削減**

おむつ使用枚数  
**35.7%削減**

《お問い合わせはこちら▼》

(株)新和メディカル 佐世保営業所

〒859-3216 長崎県佐世保市勝海町278-2

TEL: 0956-76-8236 FAX: 0956-76-8237

担当:



HPも

Checkしてね!

HP: <http://www.shinwamedical.com/index.html>