

ポータブルトイレのお悩みを解決!



「洗わない」「臭わない」「捨てるだけ」  
手間いらずなポータブルトイレ

手間とお悩みも  
これで解決!

## 思いやり優花S



### 1 後始末が簡単、らくらく



優花S用パックは紙オムツと同様の方法で処理できます。

1日1回パックを外して、ゴミ箱へポイ!

3160  
78,000円  
税込85,800円



### 2 バケツ洗いが不要です



汚物が入ったバケツを運ぶのは大変

バケツを洗う場所にも困ります。  
バケツを洗うのにかかる時間は15分

### 3



座面を閉じればパックがしっかりと閉まるので、臭いのモレを防ぎます

ベンゼンを入れ、トイレの上蓋を閉め、30分後、臭度はゼロになりました。  
(弊社独自調べ 6畳の広さを想定)



### 4 災害時にもつかえます

電気も水も不要ですので、停電、断水などの災害時にも安心して使えます。

## 優花Sの付属品

### ● 優花S用パック (お買い上げ時に、1パック30枚入りが入っています)



- 容量 (1,000CC) のパックで交換は1日に1度でOK!
- 高性能な紙オムツシートを採用しているため、尿をすばやく吸収・凝固します消臭効果もあり、清潔で衛生的です。
- 排泄音も紙パルプがやさしく吸音してくれます。
- 便座を閉じるとパックが密閉されるため、臭いを外にもりません。
- 使用済のパックは紙オムツと同様の、方法で処理できます。
- 6ヶ所ある留め具に、パックのマークに合わせて挟み込むだけで取り付けOK

3161

30枚入 **3,800円**  
税込4,180円

※サイズ・デザインは予告なく変更される場合があります。

優花S用パック 1日あたり1枚使うと約¥139(税込)

普通のポータブルトイレでも、消臭剤が1日あたり約¥150かかります。さらに水道代と洗剤、バケツ洗いも必要なので、けっしてコストは高くないです。



### ● ペーパーホルダー (お買い上げ時、本体に1個入っています)



- 片手でカットできるペーパーホルダーです。
- 工具を使わず簡単に脱着できます。
- 取り付け後に使いやすい角度に向きが変えられます。
- 紙を下から上に向けて片手でカットできます。

426236

**2,700円**  
税込2,970円

### ● 専用バケツ



- 専用バケツ付なので、普通のポータブルトイレとしてもお使いいただけます。
- 優花S用パックの買い忘れ等、急なハプニングでも大丈夫です。

### あると便利なおすすめアイテム 別売

#### ● ゼオシーター



シンエイアノ  
発泡EVA製



- ポータブルトイレ用の消臭・すべり止めシートです。ベッドからの立ち上がりサポートとしても
- 消臭剤の天然ゼオライト・セシオン配合で消臭効果は活性炭の10倍!
- 汚れても簡単に洗えて素早く乾燥します。

462007

50cm×70cm 60cm×80cm 85cm×90cm  
S **1,900円** M **2,200円** L **3,250円**  
税込2,060円 税込2,420円 税込3,575円

#### ■ 思いやり優花S 仕様

- 商品サイズ  
幅47.5cm×奥行58cm×高さ76・79・82・85cm  
ひじ掛け内寸39.5cm  
(便座までの高さ 36・39・42・45cm)
- 商品重量  
約16kg
- 耐荷重  
100kg
- バケツ容量  
10リットル
- 材質  
(本体部) 天然木 [ラバーウッド] ラッカー塗装  
(座面、背もたれ) 合成皮革・ウレタンフォーム  
(クッション) ウレタンフォーム  
(標準便座・バケツ・汚水受け) ポリプロピレン  
(開閉シャッター) スチール[黒色クロメートメッキ]
- JAN:4987991500505
- TAIS:00082-000031



《お問い合わせはこちら▼》

(株)新和メディカル 本社

〒843-0023 佐賀県武雄市武雄町昭和109

TEL : 0954-23-3605 FAX : 0954-22-2247

担当: **TEL :**



**HPも**

**Checkしてね!**

HP : <http://www.shinwamedical.com/index.html>