



今月のオススメ商品

敬老の日は大切な方に安心できる入浴時間を
安心の入浴をサポートする「TOTOバスリフト」



ひとりで立ち座りが
できない方

介助者への負担が少なく、
気軽に入浴を楽しめます



浴槽をまたいでの
立ち座りが不安な方

バスリフトに座ったまま
入浴でき安心です



ひざや腰を曲げる
のがツライ方

電動で昇降するので、
膝や腰への負担がかかりません

入浴方法

<入るとき>

バスリフトに移乗

入浴台などに腰掛けた状態から、バスリフトに移乗します。



降ろしている途中

リモコンスイッチの青いボタン(下)を押すと、シートが下がります。ボタンをはなせば途中で停止します。

青いボタン(下)を押す



降ろしきったところ

シートを浴槽の底まで降ろし、入浴をお楽しみください。



<出るとき>

バスリフトから移乗

バスリフトに腰掛けた状態から、入浴台などに移乗します。



上がっている途中

リモコンスイッチの赤いボタン(上)を押すと、シートが上がります。ボタンをはなせば途中で停止します。

赤いボタン(上)を押す



お湯に浸かっているところ

身体が温まったらお湯から上がりましょう。

※バスリフトの操作は、必ず介助者が行ってください。
※入浴や浴槽の形状によっては、肩までお湯に浸かれない場合があります。
※浴室に手すりを取り付けるとより安全性が高まります。
※バスリフトに腰掛けたとき、足が浴槽底につかず、ご利用者様が不安を感じられるような場合は、介助者の方が身体を支えていると安心です。

介助者がいない方のご使用は、危険ですのでおすすめできません!



《お問い合わせはこちら》

(株)新和メディカル 福岡営業所

〒811-1314 福岡県福岡市南区的場1丁目-27-4

担当 OOO TEL

